


# ようつゐそうぐ 腰椎装具

# 硬性（ナイト型）

## 装着方法

### 1) 前後上下の確認

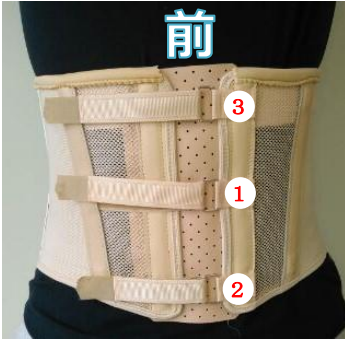

メッシュ素材がある方を前にしてください。後下部に社名シール（赤丸印部）が貼ってあります。文字が読める方向で上下を確認し、装着します。

### 2) 装着位置の確認

骨盤をしっかり覆うように装着します。

※太ももを上げた際や、座った際に、コルセットが過度に太ももに食い込まない位置に装着してください。



### 3) 装着の手順

装着は前のベルトで行います。

ベルトを締める順番は

- ① 下から2番目のベルトの仮止めをします。
- ② 1番下のベルトを締めます。
- ③ 1番上のベルトを締めます。
- ④ ベルトの①～③の順番に増し締めをします。

※適度な圧迫でずれがないようにベルトを締めて、背筋を伸ばし、体に沿うようにしてください。

### 《お手入れ方法》

本製品にはクッション材や皮革を使用している箇所があるため、発汗など水分を含んだ際は、乾いた布でふき取り、日陰でよく乾燥させてから使用してください。

株式会社 近畿義肢製作所

神戸市西区伊川谷町有瀬 990 の 1

TEL (078) 974-2412

# 《こんな場合は？》

## ・トイレに行く場合…

コルセットの上に下着やズボン等をかぶせるようにすると、コルセットを外さずに済ますことができます。

## ・座った時に痛い

コルセットは、骨盤をしっかり固定する事で効果を発揮しますが、低い椅子や床面に座ると太ももがつかえて痛いことがあります。

その場合は背もたれのある高めの椅子を使用し、もたれる姿勢をおとりください。

## ・コルセットが緩くなってきた／きつくなってきた

ベルトの締め加減で調整ができます。

※ベルトの締め加減で改善されない場合は、当社までご連絡ください。

## 使用上の注意

- ・装着時には必ず肌着を着けてください。
- ・ベルトを締めすぎるとめまいや気分が悪くなる場合があります。
- ・装着方法や装着期間等は医師・義肢装具士の指示に従ってください。
- ・本製品は、各個人の装着箇所を採寸・採型し、製作する製品（装具）です。  
目的以外の使用、又はご本人様以外が装着・使用された際の怪我や破損等に関してのお問い合わせにはお応えできない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
- ・オーダーメイドの為、お手持ちの製品（装具）が掲載写真とは作りが異なる場合があります。

株式会社 近畿義肢製作所

神戸市西区伊川谷町有瀬 990 の 1

TEL (078) 974-2412